



## 星卫士使用指南

简单三步即可使用

- 1 手表开机
- 2 APP下载
- 3 绑定手表

\*详细内容请阅读使用指南

### 1. 手表开机 **第一步**



**电源键:** 关机状态下, 长按6秒开机; 开机状态下, 长按3秒进入重启/关机画面。

打开APP扫码



**初次开机**进即可展示手表二维码, 使用APP内绑定扫描。

### 2. APP下载 **第二步**



打开手机扫描上方二维码, 下载并安装“星卫士APP”。



155\*\*\*\*9612

本机号码一键登录

切换到其他手机号登录

打开星卫士APP, 手机号完成注册登录后可进入APP。

### 3. 绑定手表 **第三步**



打开星卫士APP, 点击“**请绑定您的手表**”进入扫描界面, 扫描手表的绑定二维码。



绑定成功可查看手表信号是否完好。若出现异常, 可在网络覆盖良好地区重新尝试。

### 4. 佩戴说明



佩戴于手腕尺骨以上位置, **不要左右手混戴。松紧适度, 不要过松。**同时注意传感器的清理, 避免油污汗渍遮挡。

### 5. SOS



开机状态下, **长按SOS按钮5秒**, 手表将同时向服务中心和紧急联系人等发送求助信息。

### 6. 功能导航操作



**长按表盘**可进入表盘选择画面, 左右滑动切换, 单击选择表盘。



表盘**向左或向右滑动**可查看心率、血压、血氧、体温、血糖、睡眠、步数热量、紧急救助、运动等内容。

### 7. 手表状态提醒



打开星卫士APP, **首页>佩戴管理**, 可开启或关闭手表提醒功能。包含用药提醒、喝水提醒、久坐提醒、每日目标提醒、健康提醒等功能。



手表用药提醒展示

APP端设置提醒并开启, 到预设的时间, 手表端将震动提醒您吃药。

### 8. 充电说明



1. 将手表充电线USB接头插入电源适配器, 磁头端吸附在手表背面四个铜点上。
2. 充满电约3小时, 充满后续充2小时有利于增加电池使用续航。
3. 若无法开机或开机后自动关机, 请充电10分钟后重试。

### 温馨提示

1. 若您在查阅星卫士使用指南时有任何疑问或困难, 可直接拨打客服电话:**4000601222** 咨询。
2. 您可扫描下方二维码**关注微信公众号:“星卫士”**, 点击**“关注”**进入公众号**→右下角“找服务”**→可查阅**“开箱绑定、功能介绍、特色服务视频”**等功能。



扫码关注微信公众号

## 9. 产品参数和配件清单

星卫士手表	1
星卫士定制表带	2
磁吸式充电线	2
产品合格证	1
说明书	1
保修卡	1
尺寸	1.4英寸
电池容量	1000mAh
待机时长*	72小时
网络制式	GPRS
防水	生活防水
表带数量	2

\*待机时长因产品个体使用差异、使用习惯和环境因素不同而有所不同,请以实际使用情况为准。

## 10. 售后服务

手表自售出之日30天内,非人为损坏导致设备故障的,消费者可申请维修或换货。

全国统一客户服务热线:

4000601222

客户服务电子邮箱:

services@fuyunhealth.com

## 11. 使用须知

**1) 如发生采集不到数据的情况,可能因为下列几种因素导致:**

a 遮挡光感孔、衣物遮挡、佩戴过松、佩戴位置不正确有汗渍、磁场干扰辐射干扰都可能导致测量不到数据或误差过大。正常佩戴时出现数据中断,请用纸巾小心清洁表背感光器后佩戴。

b 手表实时连接云端上传检测数据,当无网络或弱网情况下数据采集不会停止恢复网络后数据将自动上传。

c 个人体质、身体差异会对数据采集产生一定的影响,如皮肤病、心血管疾病等因素。

**2) APP上无睡眠数据可能因为下列因素:**

a 用户熬夜入睡睡眠时间过短,入睡后心率未能下降至睡眠状态会造成没有睡眠数据。

b 睡眠佩戴期间由于遮挡光感孔衣物遮挡、佩戴过松、有汗渍等情况造成睡眠数据采集失败。

c 用户喝酒、感冒发烧或服用药物等情况,可能会导致夜间心率升高或异常造成无法得出睡眠数据。

**3) 首次使用本产品请持续佩戴3天,且每天佩戴10小时以上,收集到足够数量的身体数据才可建立用户的个人健康模型,建议夜间保持佩戴。**



**4) 为保持个人检测数据的准确性,请保持同侧手腕佩戴,不建议左右手混戴,请勿多人混戴。**

5) 装有心脏起搏器使用助听器、植入耳蜗的用户在使用手表时请咨询相关专业人员的意见。

6) 本产品是通过传感器采集手腕部位脉搏波波形,而传统血压仪是测量脉搏压,由于检测原理不同,所以测量结果会存在误差。我们的核心算法通过用户长期的佩戴获取数据曲线变化趋势去分析身体健康状况,测量数据仅供参考不能作为



临床诊断依据。

7) 若为过敏性皮肤可能由于天气炎热或长时间佩戴不透气的因素导致佩戴部位出现红肿、发炎等症状。若出现此类症状请先停止佩戴1~2天,同时使用酒精拭纸擦拭并保持皮肤通风干燥(酒精过敏者勿使用)待症状消退后可继续佩戴(同时可尝试更换表带)建议每日可取下手表一段时间,保持皮肤透气性。

8) 本产品基于移动网络同步监测数据,类似于智能手机工作方式,不同于蓝牙类型产品,优点在于实时数据监测,续航略低于蓝牙类型设备,请结合自身作息时间养成佩戴充电习惯手表满电状态下可正常使用48~72小时北方气温较低的区域可能会增加电池消耗减少续航使用时间。

9) 手表配有内置电池不可拆卸,请勿自行拆卸手表。

10) 手表可日常防水,不适用于洗澡、潜水和桑拿等场景。

## 12. 手表日常保养

1) 避免使用肥皂、洗手液、浴液、乳液等清洁剂清洗手表,以避免残留的化学物质刺激皮肤以及腐蚀设备影响防水性能。

2) 出汗后,请及时用纸巾清洁并擦干设备。皮质类表带不具备防水功能,切勿沾水以免缩短表带使用寿命。

3) 手表不适用于浮潜、热水淋浴、温泉、桑拿(蒸汽室)、跳水、潜水、滑冰,以及面对高速水流的其他涉水活动及深水活动。

4) 请勿将设备长时间放置在阳光直射处。避免设备温度过高或过低,引起设备故障。

5) 请勿在环境温度过高或过低的区域佩戴手表,可能会引起手表故障。



## 星卫士使用指南

简单三步即可使用

- 1 手表开机
- 2 APP下载
- 3 绑定手表

\*详细内容请阅读使用指南

### 1. 手表开机 **第一步**



**电源键:** 关机状态下, 长按6秒开机; 开机状态下, 长按3秒进入重启/关机画面。

打开APP扫码



**初次开机**进即可展示手表二维码, 使用APP内绑定扫描。

### 2. APP下载 **第二步**



打开手机扫描上方二维码, 下载并安装“星卫士APP”。



155\*\*\*\*9612

本机号码一键登录

切换到其他手机号登录

打开星卫士APP, 手机号完成注册登录后可进入APP。

### 3. 绑定手表 **第三步**



打开星卫士APP, 点击“**请绑定您的手表**”进入扫描界面, 扫描手表的绑定二维码。



绑定成功可查看手表信号是否完好。若出现异常, 可在网络覆盖良好地区重新尝试。

### 4. 佩戴说明



绑定完成后请您佩戴手表。佩戴于手腕尺骨以上位置, **不要左右手混戴。松紧适度, 不要过松。**同时注意传感器的清理, 避免油污汗渍遮挡。

### 5. SOS



开机状态下, 长按SOS按钮5秒, 手表将同时向服务中心和紧急联系人等发送求助信息。

### 6. 功能导航操作



**长按表盘**可进入表盘选择画面, 左右滑动切换, 单击选择表盘。



表盘**向左或向右滑动**可查看心率、血压、血氧、体温、血糖、睡眠、步数热量、紧急救助、运动等内容。

### 7. 手表状态提醒



打开星卫士APP, **首页>佩戴管理**, 可开启或关闭手表提醒功能。包含用药提醒、喝水提醒、久坐提醒、每日目标提醒、健康提醒等功能。



APP端设置提醒并开启, 到预设的时间, 手表端将振动提醒您吃药。

### 8. 充电说明



1. 将手表充电线USB接头插入电源适配器, 磁头端吸附在手表背面四个铜点上。
2. 充满电约3小时, 充满后继续充2小时有利于增加电池使用续航。
3. 若无法开机或开机后自动关机, 请充电10分钟后重试。

### 温馨提示

1. 若您在查阅星卫士使用指南时有任何疑问或困难, 可直接拨打客服电话: **4000601222** 咨询。
2. 您可扫描下方二维码 **关注微信公众号:“星卫士”**, 点击“**关注**”进入公众号 → 右下角“**找服务**” → 可查阅“**开箱绑定、功能介绍、特色服务视频**”等功能。



扫码关注微信公众号

## 9. 产品参数和配件清单

星卫士手表	1
星卫士定制表带	2
磁吸式充电线	2
产品合格证	1
说明书	1
保修卡	1
尺寸	1.28英寸
电池容量	1000mAh
待机时长*	72小时
网络制式	GPRS
防水	生活防水
表带数量	2

\*待机时长因产品个体使用差异、使用习惯和环境因素不同而有所不同,请以实际使用情况为准。

## 10. 售后服务

手表自售出之日30天内,非人为损坏导致设备故障的,消费者可申请维修或换货。

全国统一客户服务热线:

4000601222

客户服务电子邮箱:

services@fuyunhealth.com

## 11. 使用须知

**1) 如发生采集不到数据的情况,可能因为下列几种因素导致:**

a 遮挡光感孔、衣物遮挡、佩戴过松、佩戴位置不正确有汗渍、磁场干扰辐射干扰都可能导致测量不到数据或误差过大。正常佩戴时出现数据中断,请用纸巾小心清洁表背感光器后佩戴。

b 手表实时连接云端上传检测数据,当无网络或弱网情况下数据采集不会停止恢复网络后数据将自动上传。

c 个人体质、身体差异会对数据采集产生一定的影响,如皮肤病、心血管疾病等因素。

**2) APP上无睡眠数据可能因为下列因素:**

a 用户熬夜入睡睡眠时间过短,入睡后心率未能下降至睡眠状态会造成没有睡眠数据。

b 睡眠佩戴期间由于遮挡光感孔衣物遮挡、佩戴过松、有汗渍等情况造成睡眠数据采集失败。

c 用户喝酒、感冒发烧或服用药物等情况,可能会导致夜间心率升高或异常造成无法得出睡眠数据。

**3) 首次使用本产品请持续佩戴3天,且每天佩戴10小时以上,收集到足够数量的身体数据才可建立用户的个人健康模型,建议夜间保持佩戴。**



**4) 为保持个人检测数据的准确性,请保持同侧手腕佩戴,不建议左右手混戴,请勿多人混戴。**

5) 装有心脏起搏器使用助听器、植入耳蜗的用户在使用手表时请咨询相关专业人员的意见。

6) 本产品是通过传感器采集手腕部位脉搏波波形,而传统血压仪是测量脉搏压,由于检测原理不同,所以测量结果会存在误差。我们的核心算法通过用户长期的佩戴获取数据曲线变化趋势去分析身体健康状况,测量数据仅供参考不能作为



临床诊断依据。

7) 若为过敏性皮肤可能由于天气炎热或长时间佩戴不透气等原因导致佩戴部位出现红肿、发炎等症状。若出现此类症状请先停止佩戴1~2天,同时使用酒精拭纸擦拭并保持皮肤通风干燥(酒精过敏者勿使用)待症状消退后可继续佩戴(同时可尝试更换表带)建议每日可取下手表一段时间,保持皮肤透气性。

8) 本产品基于移动网络同步监测数据,类似于智能手机工作方式,不同于蓝牙类型产品,优点在于实时数据监测,续航略低于蓝牙类型设备,请结合自身作息时间养成佩戴充电习惯手表满电状态下可正常使用48~72小时北方气温较低的区域可能会增加电池消耗减少续航使用时间。

9) 手表配有内置电池不可拆卸,请勿自行拆卸手表。

10) 手表可日常防水,不适用于洗澡、潜水和桑拿等场景。

## 12. 手表日常保养

1) 避免使用肥皂、洗手液、浴液、乳液等清洁剂清洗手表,以避免残留的化学物质刺激皮肤以及腐蚀设备影响防水性能。

2) 出汗后,请及时用纸巾清洁并擦干设备。皮质类表带不具备防水功能,切勿沾水以免缩短表带使用寿命。

3) 手表不适用于浮潜、热水淋浴、温泉、桑拿(蒸汽室)、跳水、潜水、滑水,以及面对高速水流的其他涉水活动及深水活动。

4) 请勿将设备长时间放置在阳光直射处。避免设备温度过高或过低,引起设备故障。

5) 请勿在环境温度过高或过低的区域佩戴手表,可能会引起手表故障。